

Point Thumb

Brugsvejledning



point designs

Dette dokument indeholder oplysninger til de protesespecialister, der skal montere Point Thumb.

Der henvises til

www.pointdesignsllc.com/resources

for at sikre, at du har den seneste version af dette dokument.



point designs
1216 Commerce Ct., Ste 3
Lafayette, CO 80026
(720) 600-4753
www.pointdesignsllc.com
info@pointdesignsllc.com



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen
Tyskland

Rx ONLY

Forsigtig: Ifølge føderal lovgivning må denne anordning kun sælges af eller efter ordre fra en protesespecialist.



Dette symbol bruges gennem hele vejledningen til at angive vigtige oplysninger, hvor du skal være forsigtig. Det er vigtigt, at du er opmærksom på dette symbol.

Point Thumb

BRUGSVEJLEDNING

V2.0

31. MAJ 2022

Tak for at vælge Point Thumb og give din klient en effektiv og robust protesefingerløsning.

Uanset om du eftermonterer Point Thumb i en eksisterende protesesokkelen, eller du bygger en ny protese fra bunden, vil denne vejledning gøre dig fortrolig med Point Thumbs funktionalitet og installation.

Installationen af enhver Point Thumb-enhed bør udelukkende udføres af en autoriseret protetiker eller tekniker. Point Thumbs er beregnet til at blive betjent af en protesebruger efter installation og opsætning. Enhver uautoriseret håndtering eller installation af en Point Thumb-enhed kan ugyldiggøre garantien.

Har du spørgsmål? Vi vil gerne hjælpe.
Ring til os eller send os en e-mail.

(720) 600-4753

support@pointdesignsllc.com

Point Thumb

Tilsigtet anvendelse

Point Thumb-systemet er en fingerprotese, der er en genanvendelig, ikke-steril, ikke-aktiv og ikke-invasiv medicinsk anordning. Den skal anvendes som langsigtet kompensation for et handicap. Den skal udelukkende anvendes til eksterne protesebeslag på de øvre lemmer. Det er beregnet til at give fleksion og ekstension ved metacarpal phalangeal (MCP) og interphalangeal (IP) led for at generere stabile håndgreb. Point Thumb er beregnet til at passe på personer med tommelfingeramputationer ved eller i nærheden af metacarpal phalangeal (MCP) led. Patientpopulationen er ikke specifik, og den anvendes af normale personer og sundhedspersonale i kliniske hjemlige, arbejdsmæssige og/eller industrielle miljøer. Point Thumb-systemet anvendes i kombination med protesesokler.

Indikationer

Brugere af Point Thumb-systemet vil opnå det bedste kliniske resultat, hvis de har en tommelfingeramputation ved eller i nærheden af MCP-leddet.

Tilsigtet patientpopulation

Point Thumb er beregnet til at passe på personer med tommelfingeramputationer ved eller nær det metacarpophalangeale (MCP) led. Patientpopulationen er ikke specifik, og den bruges af lægpersoner og sundhedspersonale på klinikker, i hjemmet, på arbejdspladser og/eller i industrielle miljøer. Point Thumb-systemet anvendes i kombination med protesesokler.

Tilsigtede brugere

Point Thumb skal installeres i en protesesokkel af en uddannet protesespecialist og anvendes af brugere med delvis håndamputation. **Point Thumb** er kompatibel med de fleste protesesokler og monteres i protesesoklen af en uddannet protetiker eller tekniker.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Indholdsfortegnelse

Introduktion til Point Thumb	7
Kliniske fordele ved Point Thumb	8
Komponentbeskrivelse	9
<i>Point Thumb-enhed</i>	9
<i>Afstandsstykker til laminering</i>	9
<i>Monteringsskruer</i>	9
<i>Monteringsbeslag</i>	10
<i>Justeringsværktøj</i>	10
<i>Justeringsoverførselsstift</i>	11
<i>Fingerspidspuder</i>	14
<i>Laterale grebspuder</i>	14
<i>Gribebånd</i>	14
Specifikationer	15
Installation	16
<i>Installation af fingerspidspude</i>	16
<i>Installation af lateral grebspude</i>	18
<i>Installation af gribebånd</i>	19
<i>Fjernelse af fingerspidspuder</i>	21
<i>Fjernelse af laterale grebspuder</i>	21
<i>Fjernelse af gribebånd</i>	22
Brug af Point Thumb	23
<i>Positionering/bøjning</i>	23
<i>Frigørelse/udstrækning</i>	23
Fejlfinding	25
Vedligeholdelse af Point Thumb	27
<i>Forebyggende inspektion</i>	27
<i>Vedligeholdelse</i>	27
<i>Bortskaffelse</i>	27
<i>Reparationer, returneringer og garanti</i>	27
Sikkerhed og advarsler	28
Bilag	33

Introduktion til Point Thumb

Laterale grebspuder



Spritserviet



Point Thumb



Justeringsværktøj



Monteringsværktøj



Justerings-
overførselsstift



Torx®-værktøj



Fingerspidspude



Gribebandr



Monteringsbeslag



Installationsværktøj til
fingerspidspude



Laminerings-
afstandsstykke



*Billederne er ikke i 1:1 størrelsesforhold. Laterale grebspuder er ikke forudinstalleret.

Point Thumb er en passiv (dvs. ikke drevet) mekanisk tommelfinger til personer med tommelfingeramputationer. Den er udstyret med en skraldemekanisme, der gør det muligt at bruge den med én hånd og i op til 11 forskellige låse positioner. **Point Thumb** har integrerede fingerspidspuder, der er compatible med berøringsskærme* for forbedret greb. **Point Thumb** er fremstillet af titanium for robust styrke.

Point Thumb kan bøjes og låses ved at anvende tryk på bagsiden af fingerspidspuden. Dette tryk kan påføres af den kontralaterale hånd eller af en modsatrettet overflade (f.eks. ben, bord, skrivebord, væg, stol osv.).

*Berøringsskærmskompatibilitet er ikke garanteret, men er blevet testet på almindelige iOS-, Android- og Windows-enheder ved hjælp af standardsokkelmateriale (indvendig silikoneforing med en yderskal i kulfiber)

Introduction to the Point Thumb

Point Thumb kan udstrækkes på en af to måder:

- 1) fjernelse af tryk fra trykknappen, eller
- 2) fuld bøjning af fingeren for at aktivere den automatiske fjederfunktion.


En enkelt **Point Thumb** kan integreres i en protesefatning ved hjælp af monteringssættet, som inkluderer et monteringsbeslag, lamineringsafstandsstykke, justeringsværktøj, justeringsoverføringsstift og monteringsskruer.

Kliniske fordele ved Point Thumb

Point Thumb giver patienter flere vigtige kliniske fordele. Først og fremmest giver **Point Thumb** mulighed for betjening med én hånd uden at kræve, at den kontralaterale hånd positionerer tommelfingeren. Ethåndsbetjeningsfunktionen i **Point Thumb** gør den til den eneste klinisk robuste, passive protetiske tommelfinger for personer med bilaterale og delvise håndamputationer. For det andet er styrken af **Point Thumb** den højeste rapporterede partielle fingerstyrke i branchen, som gør det muligt for patienter at udføre aktiviteter med høj belastning, såsom aktiviteter i industrielle eller rekreative miljøer. For det tredje er der 3 standardlængder af **Point Thumb** der opfylder behovet hos 1. til 99. percentil af mandlige patienter og 1. til 100. af percentil kvindelige patienter. For det fjerde har **Point Thumb** et virtuelt rotationscenter omkring MCP-leddet, som sørger for korrekt anatomisk justering af tommelfingerleddet. For det femte tilbyder **Point Thumb** op til 11 låsepositioner for at sikre stabile greb om (næsten) enhver størrelse objekt.

Komponentbeskrivelse


POINT THUMB

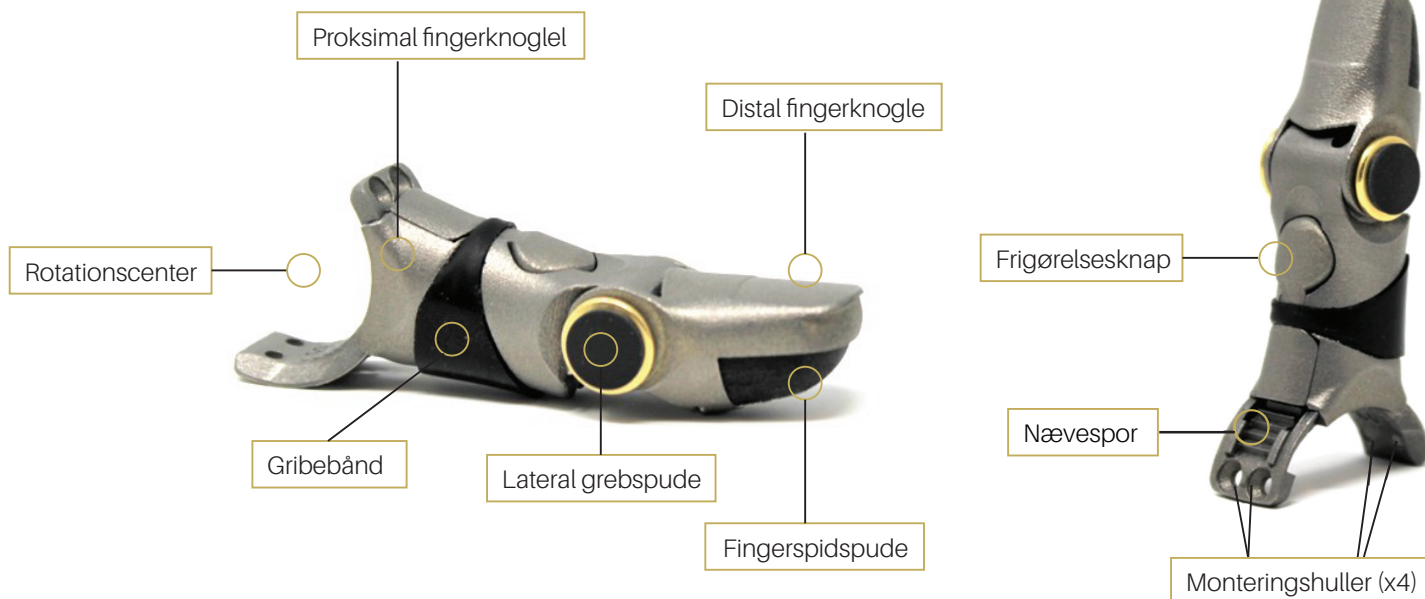

Point Thumb leveres samlet som én enhed. **Point Thumb** består af en kurvet knoskinne, proksimale fingerknogler, mediale fingerknogler, distale fingerknogler, gribebånd, en frigørelsesknop, fingerspidspuder, laterale grebspuder og flere andre interne dele. Den kurvede knoskinne har 4 monteringshuller.

AFSTANDSSTYKKER TIL LAMINERING

Lamineringsafstandsstykket er en buet komponent med monteringshuller og et firkantet monteringsområde til justering af værktøjtilbrug under lamineringsprocessen.

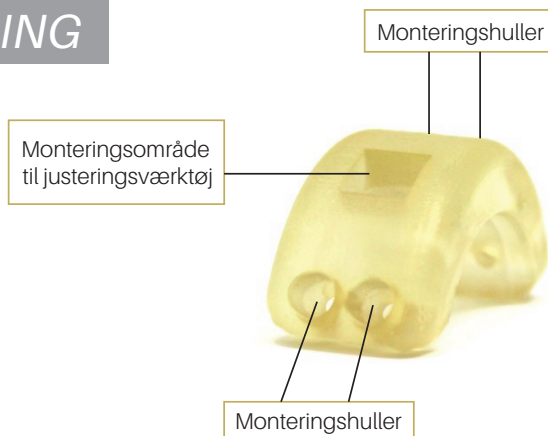


MONTERINGSSKRUER

Torx®-monteringsskrue (M2x5 mm) er beregnet til fastgørelse af lamineringsafstandsstykkerne til beslaget under lamineringsprocessen og til montering af fingrene på beslaget. 8 skrue pr. finger leveres med hver **Point Thumb**.



Komponentbeskrivelse

MONTERINGSBESLAG

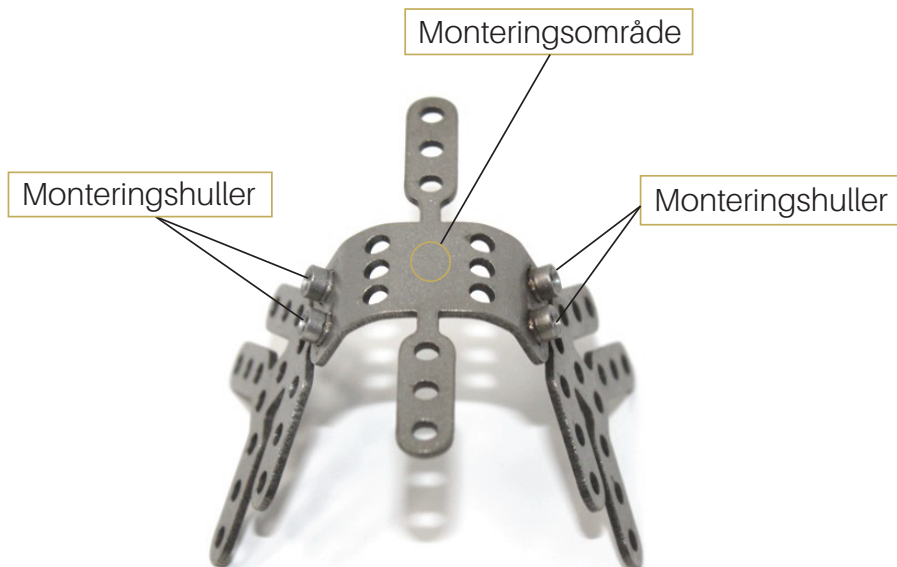

Monteringsbeslaget er en enkelt del bestående af et monteringsområde og 4 monteringshuller. Monteringsbeslaget er designet til at være symmetrisk til bilateral brug, dvs. det kan monteres på både venstre og højre hånd i samme orientering.

JUSTERINGSVÆRKTØJ

Justeringsværktøjet er et tilbehør designet til at hjælpe med justeringen af en **Point Thumb** under fremstilling. Justeringsværktøjet skal bruges i kombination med lamineringsafstandsstykket. Når det indsættes i det firkantede monteringshul på toppen af lamineringsafstandsstykket og derefter boltes på monteringsbeslaget, repræsenterer justeringsværktøjet positionen af **Point Thumb** gennem hele dets bevægelsesområde. Mens indledende justering kan udføres ved hjælp af justeringsværktøjet, anbefales det altid at fastgøre **Point Thumb** til beslaget før den endelige fremstilling for at verificere justering og funktion.



Komponentbeskrivelse

JUSTERINGSOVERFØRSELSSTIFT

Justeringsoverførselsstiften er et stykke tilbehør designet til at hjælpe med overførsel af en **Point Thumb** fra en diagnostisk sokkel til en endelig sokkel, mens justeringen bevares. Justeringsoverførselsstiften skal bruges i kombination med lamineringsafstandsstykket. Justeringsoverførselsstiften er lavet af 0,635 cm firkantet aluminium med et M2-gevindhul i den ene ende. For at bruge skal du indsætte enden med gevindhullet i det firkantede monteringshul på lamineringsafstandsstykket. Fastgør justeringsoverførselsstiften til lamineringsafstandsstykket ved at indsætte en M2x5 mm skrue fra undersiden af lamineringsafstandsstykket. Når justeringen af beslaget er opnået på diagnosefatningen, boltes samlingen til justeringsoverførselsstiften/lamineringsafstandsstykket til beslaget. Anbring den diagnostiske sokkelsamling i en lodret justeringsoverførselsfikstur (medfølger ikke), og sæt justeringsoverførselsstiften i en beholder (f.eks. kop, skål, spand osv.) med gips. Sørg for at sikre gipsbeholderen, så den ikke bevæger sig. Når gipset er hærdet, skal du adskille beslaget fra diagnosefatningen, hæve den lodrette justeringsfikstur, fjerne diagnosesokkelen fra formen og udskifte den med den indledende oplægning af den endelige sokkel. Sænk den lodrette justeringsoverførselsfikstur, og sæt derefter beslaget fast i den endelige sokkel. På dette tidspunkt skal justeringen overføres, og den endelige laminering kan udføres.

Justeringsoverførselsstiften skal bruges, både når der fremstilles en diagnostisk og en endelig fatning, hvor det er nødvendigt at opretholde justering under overførsel af **Point Thumb**. Dette tilbehør er ikke nødvendigt, hvis du udfører en direkte til endelig fremstilling, hvor justering udføres på den endelige sokkel.



Komponentbeskrivelse

JUSTERINGSOVERFØRSEL

Justerings-
overførselsstift



Monteringsbeslag



Lamineringsafstandsstykke



Justeringsværktøj



Monteringsværktøj




Lamineringsafstandsstykke
monteret på beslag



Komponentbeskrivelse

JUSTERINGSOVERFØRSEL

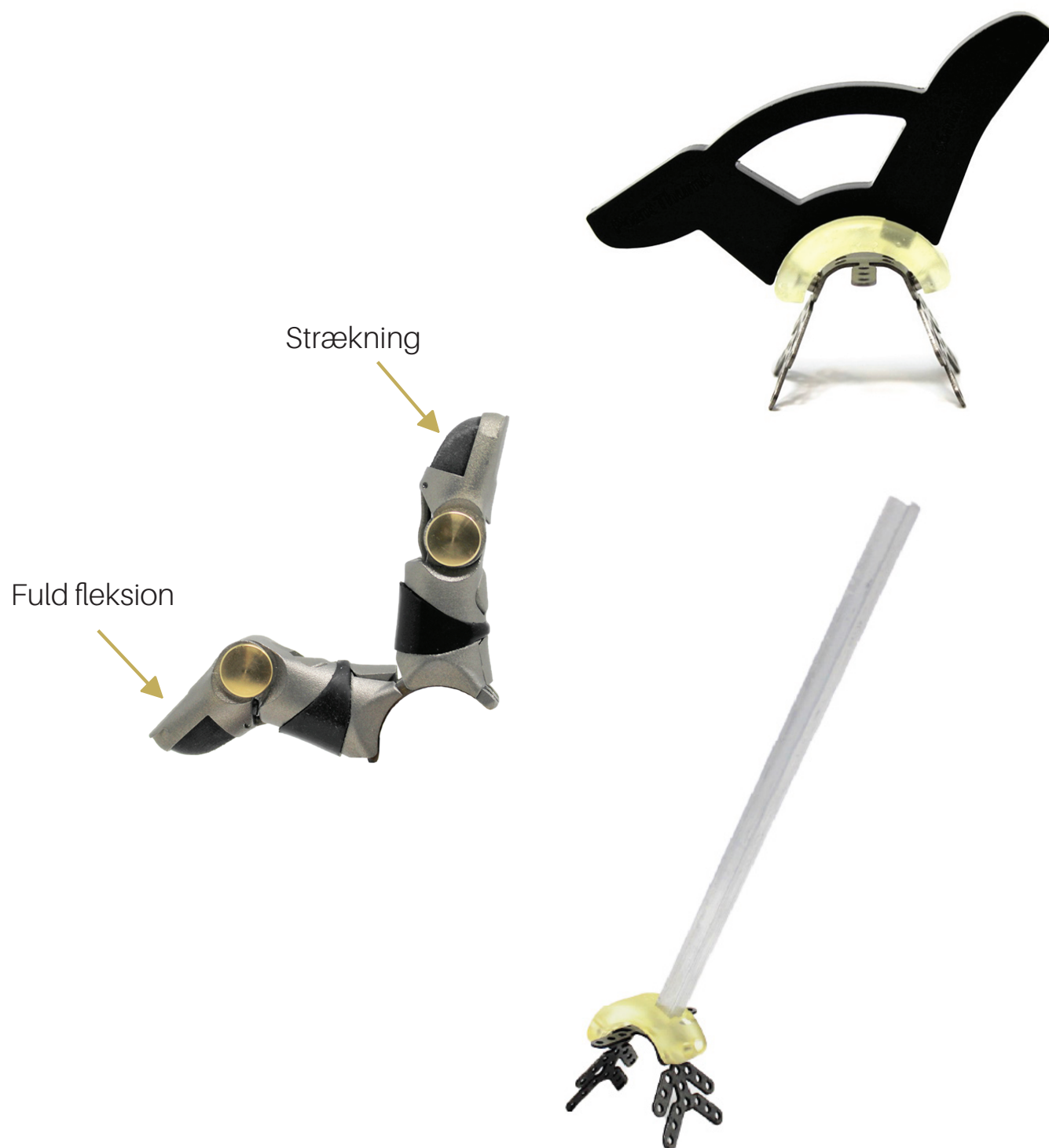

Komponentbeskrivelse

FINGERSPIDSPUDER


Point Thumb har integrerede fingerspidspuder, der er kompatible med berøringskærme* for forbedret greb. Hver Point Thumb leveres med en forudinstalleret fingerspidspude, fem udskiftningspuder og et monteringsværktøj. Yderligere udskiftningspuder kan anskaffes ved at kontakte support@pointdesignsllc.com

LATERALE GREBSPUDER

Point Thumb leveres med laterale grebspuder, der skal installeres efter fremstilling af soklen og montering af den endelige finger. Sidegrebspuderne er beregnet til kontakt med pegefingerleddene for at forbedre sidegrebet. Ti laterale grebspuder og flere overfladeforberedende servietter er inkluderet i hver ordre.

GRIPBÅND

Point Thumb kommer med et greb installeret. Gribebåndet er beregnet til kontakt med overfladen af en genstand for at forbedre grebet. Fem ekstra grebsbånd medfølger med hver Point Thumb.

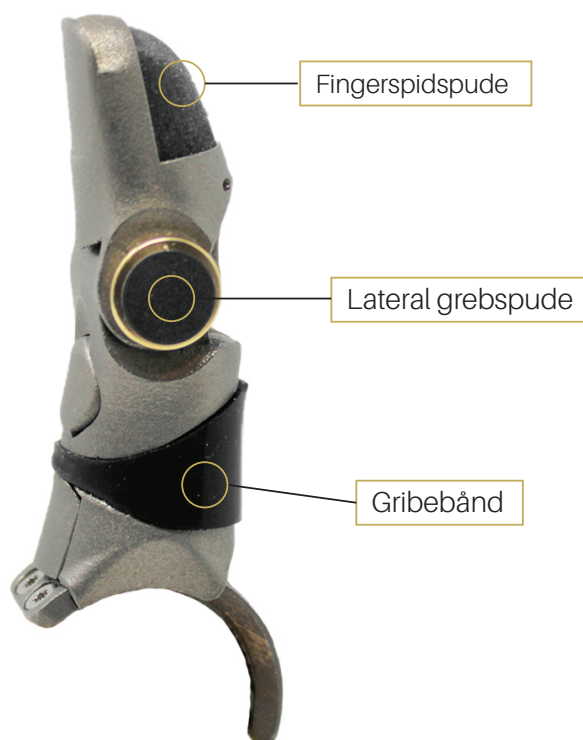

*Berøringskærmskompatibilitet er ikke garanteret, men er blevet testet på almindelige iOS-, Android- og Windows-enheder ved hjælp af standardsokkelmateriale (indvendig silikoneforing med en yderskal i kulfiber)

Specifikationer

Materiale	<i>Titanium</i>
Forventet levetid	<i>3 år</i>
Nominal grebsstyrke (klemning)	<i>667 N</i>
Nominal grebsstyrke (kroggreb)	<i>667 N</i>
Nominal rivestyrke	<i>1334 N</i>

Installation

INSTALLATION AF FINGERSPIDSPUDE

Fingerspidspuden har enten 2 huller (til 73 mm tommelfinger) eller 1 hul (til 59 mm og 66 mm tommelfinger), og den distale phalange af Point Thumb vil have et tilsvarende antal stolper.

Point Thumb



Installationsværktøj



Fingerspidspude



1. Tryk puden ned på stiften/stifterne, så de sidder i hullerne i puden. Start med at trykke på den proksimale ende af puden og arbejd dig op distalt. Oprethold trykket på toppen af puden, mens du bevæger dig til trin 2.



Installation

INSTALLATION AF FINGERSPIDSPUDE

2. Da puden for det meste sidder på stiften/stifterne, skal du bruge installationsværktøjet til at trykke på kanterne af puden under kanten af den distale fingerknogle. Start denne proces i den proksimale ende og arbejd dig derefter op distalt. Sørg for at opretholde trykket på toppen af puden under denne proces.



3. Når kanterne er trykket ind, skal du trykke på toppen af puden og rokke forsigtigt frem og tilbage for at sikre, at puden sidder fast. Hvis det ser ud til, at puden stadig buer ud, skal du gentage trin 2.



INSTALLATION AF LATERAL GREBSPUDE


De laterale grebspuder leveres i en pakke med 10 klæbepuder med polymerforing. Du skal kun bruge 2 puder, da de kun monteres på den laterale side af en tommelfinger.



1. Rengør beggemessingsamlingsbolte med spritservietten (inkluderet).



2. Fjern den laterale grebspude fra bagsiden.

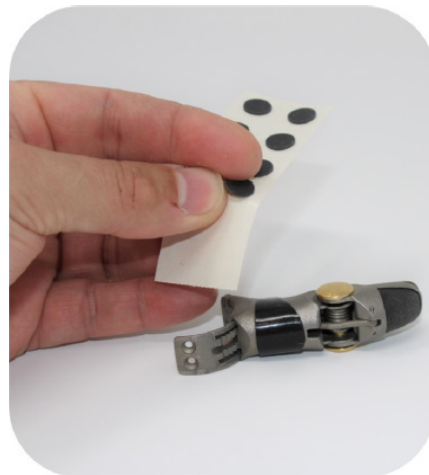

3. Centrér over leddet, og tryk derefter på samlebolten og hold trykket i mindst 10-20 sekunder. At klemme puden i 72 timer vil give de bedste resultater, men det er ikke et krav.



INSTALLATION AF GRIPBÅND

Gribebånd kommer forudinstalleret på Point Thumb. Fem erstatningsgreb medfølger med hver Point Thumb.

Point Thumb



Installationsværktøj



Gribebånd



1. Indsæt Gribebåndet over den distale phalanx. Sørg for, at den mindre bredde på Gribebåndet er over oversiden af den distale phalanx.



2. Med Point Thumb i forlængelse, rul Gribebåndet ned langs cifferets længde.



INSTALLATION AF GRIPBÅND

3. Fortsæt med at rulle ned i længden af cifferet, indtil Gripbandet når Gripband-udskæringen.



4. Brug installationsværktøjet til at placere Gripbandet i Gripband-udskæringen.



FJERNELSE AF FINGERSPIDSPUDER

1. Brug installationsværktøjet (eller et lignende værktøj såsom en skruetrækker med fladt hoved) til at glide mellem puden og bagsiden på den distale fingerknogle, og bøj puden opad.



2. Brug fingrene til at tage fat i puden og træk den delvist opad.



FJERNELSE AF LATERALE GREBSPUDER

1. Træk puden af samlebolten ved hjælp af din fingernegl eller et passende værktøj.

FJERNELSE AF GRIBEBÅND

1. Med tallet i forlængelse, brug installationsværktøjet til at skubbe Gripbandet ud af udskæringsdelen.



2. Rul gripbandet ud i længden af cifferet.



Brug af Point Thumb

POSITIONERING/BØJNING

Skub på
tommelfingeren
til den ønskede
grad af fleksion



FRIGØRELSE/UDSTRÆKNING

Der er to metoder til at strække fingeren fra en låst bøjningsposition;
1) den manuelle frigørelsesknap; og
2) den automatiske fjederfunktion.

1. Manuel frigørelse




2. Fjederfunktion

Fuldt bøjet finger



Knappen bør støttes op i fuld fleksion

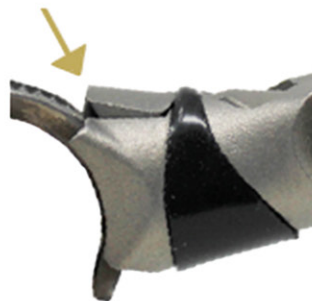

Frigørelse



Hvis knappen ikke nulstilles, skal du tvinge den tilbage

Fejlfinding

I tilfælde af et problem er dette afsnit beregnet til at hjælpe dig med betjeningsfejlfinding af Point Thumb.

Vi har inkluderet et par mulige problemer med løsninger nedenfor. Hvis dit problem ikke er løst, skal du sende os en e-mail for hjælp på support@pointdesignsllc.com.

Point Thumb bevæger sig frit og låser ikke i position

ELLER

Kan ikke trykke på Point Thumb-knappen eller; knappen sidder fast i trykket position

Skraldemekanismen er højst sandsynligt ikke blevet nulstillet efter den automatiske fjedningsfunktion blev aktiveret. For at løse dette problem skal du anvende et tryk på fingerspidsen i udstrakt position, indtil fingeren "klikker", og nulstille skraldemekanismen.

Point Thumb bøjes ikke helt

Rengør den kurvede knoskinne for snavs ved hjælp af en ren klud, et mildt rengøringsmiddel eller trykluft. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte os for hjælp.

Point Thumb nulstiller før fuld udtrækning

Knappen blev ikke nulstillet korrekt under udtrækning. Sørg for, at fingren når fuld bøjning, og at knappen nulstilles under fuld bøjning.

Point Thumber løs eller har løsnet sig fra monteringsbeslaget

Sørg for, at skruesikringen er blevet fastgjort til Torx-skruerne, og stram dem derefter. Hvis Torx-skruerne ikke kan strammes, skal du kontakte os for yderligere hjælp.

Point Thumb er tæret

Kontakt os for support.



Brugere og/eller patienter skal indberette enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med anordningen, til:

- Point Designs på support@pointdesignsllc.com
- FDA via MAUDE (for hændelser i USA)
- Den kompetente myndighed i de medlemsstater, hvor de er etableret i EU/EØS (for sager i EU/EØS)

Vedligeholdelse af Point Thumb

FOREBYGGENDE INSPEKTION

Alle **Point Thumb**-systemer gennemgår omfattende kvalitetssikringsinspektioner forud for forsendelse. Kontrollér regelmæssigt **Point Thumbs** for snavs/smuds i leddene, spærretænder og glideskinner. Rengør **Point Thumbs** (se afsnittet **VEDLIGEHOLDELSE** nedenfor), hvis der opstår nedsat ydeevne.

VEDLIGEHOLDELSE

Point Thumb kan rengøres med en rengøringsopløsning såsom sæbe + vand eller rengøringsmiddel + vand. Tør fingren med et rent håndklæde eller trykluft. Sørg for at tørre **Point Thumb** helt af efter at enheden har været våd, især når væsken sandsynligvis vil forværre rust (f.eks. saltvand, sved osv.).

Smøring (f.eks. WD-40, grafit osv.) kan påføres leddene og skinnen efter rengøring, hvis der opstår øget modstand.

Der er ikke behov for regelmæssig pleje af fingerspidspuderne, men de kan rengøres med isopropylalkohol om nødvendigt.

Hvis der opstår unormale problemer, skal du stoppe brugen og kontakte Point Designs for hjælp.

BORTSKAFFELSE



En **Point Thumb** bør ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf **Point Thumb-enheder** enten ved at returnere anordningen/anordningerne til Point Designs eller ved at tage anordningen/anordningerne til dit nærmeste metalgenbrugscenter.

REPARATIONER, RETURNERINGER + GARANTI

Kontakt Point Designs på support@pointdesignsllc.com omkring reparationer og returneringer. **Point Thumb** leveres med en producentdefektgaranti på ét år.

Nærmere oplysninger om garantien findes i separat dokumentation på www.pointdesignsllc.com/resources

Sikkerhed og advarsler



ADVARSEL: Point Thumb er ikke beregnet til at fungere kontinuerligt i våde omgivelser. Point Thumb kan lejlighedsvis blive våd, men brugeren rådes til at tørre Point Thumb efter udsættelse for enhver væske. Langvarig udsættelse for væske kan forårsage korrosion.



ADVARSEL: Point Thumb er elektrisk ledende og udgør dermed en potentiel fare for elektrisk stød, hvis den kommer i kontakt med en spændingsforskel og brugerens (eller en andens) hud på samme tid. Point Thumb bør ikke bruges omkring spænding/strøm.



ADVARSEL: Point Thumb er termisk ledende og udgør således en potentiel forbrændingsfare, hvis det kommer i kontakt med en varmekilde og derefter brugerens (eller andres) hud efterfølgende. Point Thumb bør holdes væk fra varme genstande. Hvis en Point Thumb bliver varm, skal den have lov til at køle ned, før huden kommer i kontakt med enheden.



ADVARSEL: Point Thumb indeholder jernholdigt materiale og kan derfor interagere med magnetfelter. Der skal udvises forsigtighed ved anvendelse af Point Thumb omkring magneter for at undgå utilsigtet magnetisk tiltrækning. Eksempel: *hold væk fra MR-maskiner.*



ADVARSEL: Point Thumb indeholder bevægelige dele (f.eks. ledsystemer, fjedre, spærremekanismer osv.) og udgør således en mindre klemningsfare. Brugeren skal være forsigtig og holde løs hud, tøj osv. fra de bevægelige dele af Point Thumb.



ADVARSEL: Point Thumb indeholder indre fjedre med spænding. Den fjedrende mekanisme får fingeren til at strække sig hurtigt, hvilket udgør en mindre fare. Brugeren skal sørge for at holde Point Thumb væk fra sig selv og andre når fjedren frigives.



ADVARSEL: Enhver uautoriseret ændring af en Point Thumb-systemet kan udgøre en sikkerhedsrisiko for brugeren og vil ugyldiggøre garantien. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Point Designs, kan ugyldiggøre brugerens bemyndigelse til at betjene udstyret.



ADVARSEL: Tilføjelse af materiale (f.eks. belægninger osv.) til en Point Thumb, der kan opfange fugt, frarådes på grund af sandsynligheden for accelereret korrosion.



ADVARSEL: Slutbrugeren er den tilsigtede operatør af enheden og er ansvarlig for dens anvendelse.



ADVARSEL: Point Thumb giver ingen fornemmelse; varme og fugt kan ikke mærkes.



ADVARSEL: Komponenterne må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde.



ADVARSEL: Undlad at udføre vedligeholdelse, når den er i brug.



ADVARSEL: Bær ikke genstande kun ved hjælp af spidserne på fingrene. Bær genstande ved jævnt at fordele vægten på tværs af fingrene, så tæt på dine knoer og håndfladen som muligt.



ADVARSEL: Må ikke anvendes sammen med maskiner med bevægelige dele, der kan forårsage personskade eller beskadigelse.



ADVARSEL: Må ikke anvendes til ekstreme aktiviteter, der kan forårsage skade på en naturlig hånd.



ADVARSEL: Må ikke udsættes for overdrevne eller høje tryk, især på fingerspidserne og på siden af fingrene.



ADVARSEL: Må ikke udsættes for overdreven fugt, væsker, støv, høje temperaturer eller stød.



ADVARSEL: Må ikke anvendes i farlige miljøer.



ADVARSEL: Må ikke udsættes for høje temperaturer.



ADVARSEL: Må ikke udsættes for flammer.



ADVARSEL: Må ikke anvendes i eller udsættes for eksplosive miljøer.

*Advarsler, der er dækket i dette afsnit, er restriksi forbundet med brug af Point Thumb.



FORHOLDSREGLER: Brugerne skal overholde lokale bestemmelser om betjening af biler, fly, sejlskibe af enhver art og ethvert andet motoriseret køretøj eller udstyr. Det er brugerens ansvar at søge bekræftelse på, at de er fysisk og juridisk i stand til at køre ved hjælp af **Point Thumbs** og i det omfang loven tillader det.












FORHOLDSREGLER: Må kun bruges med godkendt Point Designs-tilbehør og -værktøj.



FORHOLDSREGLER: Vedligeholdelse, reparationer og opgraderinger må kun udføres af kvalificerede Point Designs-teknikere og tekniske partnere. Point Designs vil efter anmodning give oplysninger til at hjælpe servicepersonale med reparation af en enhed.

Bilag I

BESKRIVELSE AF SYMBOLER FRA PRODUKTETS ETIKET

Symbol	Beskrivelse
	KATALOG-/ARTIKELNUMMER
	FORSIGTIG
	FREMSTILLINGSDATO
	EUROPÆISK AUTORISERET REPRÆSENTANT
	SE BRUGSANVISNINGEN
	PARTINUMMER/BATCHKODE
	PRODUCENT
	MEDICINALSK ANORDNING
	SERIENUMMER

BEMÆRKNINGER

BEMÆRKNINGER



point designs

www.pointdesignsllc.com

info@pointdesignsllc.com

(720) 600-4753